

アルコールフラッシュを行うことができない場合の対応方法  
HOYA 社製 (PENTAX) スコープ用

1. HOYA 社製スコープとの組み合わせで検証しているアルコールは下記 3 点です (この 3 点以外のアルコールについては検証が充分にできておりません)。

- ・ 日局消毒用エタノール
- ・ イソプロパノール添加エタノール液
- ・ 70 %イソプロパノール液

2. 再処理に使用した水の残留による水生菌の増殖を防止する観点からアルコールフラッシュの代替案と考えられるのは以下 3 点になります。

- 1) 内視鏡洗浄消毒機に付いている送気を単独工程で実施していただく。  
※ 施設にてご使用の洗浄機消毒機のメーカーに問い合わせ、送気する時間を確認していただく必要があります。
- 2) アルコールの代わりに滅菌水を送液し、可能な限り廃液した後、HEPA フィルター付の保管庫で乾燥させる ([http://www.taiho-cab.co.jp/product/endoscope\\_8.html](http://www.taiho-cab.co.jp/product/endoscope_8.html) を参照)。
- 3) アルコールフラッシュによる管路乾燥を実施できなかった場合、再処理後ある程度の時間 (例えば 3 時間) が経過した内視鏡は使用直前に再度再処理を実施する。